


# c o m m u n i t y - t e x t i l m a s k e m u n d - n a s e n - s c h u t z

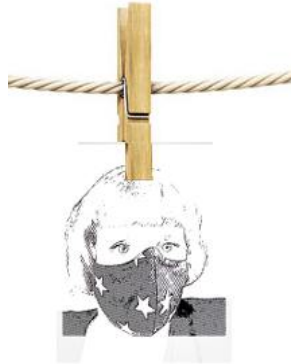

Hallo Liebe\*r zukünftige\*r Benutzer\*in ,

Du erhältst hier einen mit Liebe gefertigten Mund-Nasen-Schutz (MNS) .

## **Vorneweg:**

Der MNS ist nicht genormt und zertifiziert dient lediglich als Hilfsmittel! Die Benutzung ist Eigenverantwortlich.

Die Übertragung von Corona Viren erfolgt über Tröpfchen, die unter anderem beim Sprechen, beim Husten oder Niesen entstehen und auf die Schleimhäute von Kontaktpersonen gelangen können. Bereits ein MNS kann die Verteilung von Tröpfchen in die Umgebung und auf Kontaktpersonen verhindern.

Das Tragen eines MNS kann die Übertragungswege einer Corona-Infektion reduzieren. Er stellt nur bedingt einen Eigenschutz dar.

## **Nachfolgend ein paar Informationen zur Handhabung und Reinigung:**

### **Anpassung:**

Der Elastik kann individuell angepasst werden. Bei Bedarf Elast enger knüpfen.

**Gebrauchte Maske in einem Beutel verstauen und nicht lose in Tasche!**

### **Reinigung:**

- Vor der erstmaligen Benutzung MNS bei 60° waschen.
- Alternativen zur 60° Wäsche in der Waschmaschine: Wasser in Topf vor Kochen bringen (60°) und Maske 5 min. Köcheln lassen, Handwäsche mit Seife und mit kochendem Wasser übergießen.
- Nach der Benutzung ist der MNS vorsichtig ausziehen und möglichst dabei nicht die Außenfläche zu berühren. Nach dem Ausziehen sollte eine Händewaschung durchgeführt werden. Gebrauchte MNS sollten nach der Benutzung bzw. mindestens einmal täglich wie oben beschrieben gereinigt werden.
- Der MNS sollte max. 3-4 Std. getragen werden
- Bei sichtbarer Verschmutzung oder Durchfeuchtung bitte wechseln
- weiterhin auf eine gute Händehygiene achten